



TASKI[®] Sprint Degerm


**Preparat w koncentracji do dezynfekcji
i mycia wszystkich zmywalnych dużych
powierzchni oraz różnego rodzaju wyposażenia.**

- szerokie spektrum biobójcze w krótkim czasie działania
- dodatkowe działanie przeciwko szczepom opornym
- niskie stężenie roztworu roboczego
- delikatny dla powierzchni
- neutralny zapach

**Preparat do użytku profesjonalnego.
Produkt biobójczy - pozwolenie
nr 3544/8 (Kat. I, gr. 2, 4)**

TASKI® Sprint Degerm

**Preparat w koncentracie do dezynfekcji
i mycia wszystkich zmywalnych dużych
powierzchni oraz różnego rodzaju wyposażenia.**

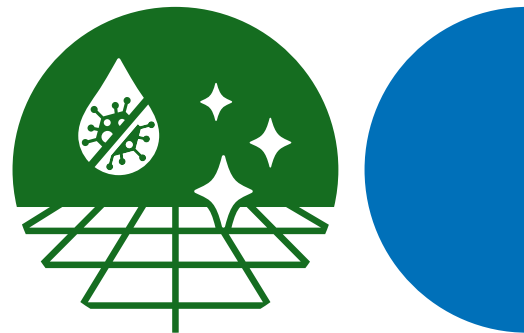

PODSTAWOWE CECHY

- wykazuje szerokie spektrum biobójcze: bakterio-, drożdżako-, grzybo- i prątkobójczy oraz aktywność wobec wirusów: HIV, HBV, HCV, Corona, Adeno, Noro, Rota
- dotatkowe działanie przeciwko: Salmonella enterica, Listeria monocytogenes i Legionella pneumophila
- stężenie: 0,5%, czas działania: 15 min.
- stabilność nieużywanego roztworu roboczego – 4 tygodnie
- polecany również do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością
- idealny do dezynfekcji zabawek
- możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach położniczych i noworodkowych
- nieograniczona kompatybilność materiałowa
- możliwość dozowania płynu przy użyciu pomp dozujących typu QFM -R Gab HF/LF

INSTRUKCJA UŻYCIA

Preparat do użytku profesjonalnego.
Koncentrat – stosować w roztworach roboczych.

- Stosować stężenie w zależności od wymaganego spektrum biobójczego i zgodnie z zalecanym czasem ekspozycji (szczegółowe informacje na opakowaniu preparatu).
- Odmierzyć odpowiednią ilość płynu i dodać do uprzednio odmierzonej objętości wody. Zalecane stężenie: 0,5%, tj. 5 ml na 1 litr wody wodociągowej.
- Przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchnie zmywać dokładnie za pomocą ścierek i mopów nasączonych roztworem roboczym preparatu.

Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Postępowanie z odpadami

Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowanie powinno zostać zutylizowane przez certyfikowanego odbiorcę lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzanie do ścieków nie jest wskazane. Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiązującym prawem.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w zamkniętych pojemnikach z dala od żywności, napojów i środków żywienia zwierząt. Wchodzi w reakcję z kwasami.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

Informacje ogólne: objawy zatrucia mogą wystąpić nawet po kilku godzinach. Kontrola lekarska niezbędna jest co najmniej przez 48 godzin po zdarzeniu.

Wdychanie: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.

Kontakt przez skórę: myć skórę dużą ilością letniej, łagodnie płynącej wody, przez przynajmniej 30 minut. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

SKŁAD CHEMICZNY

100 g płynu zawiera: czwartorzędowe związki amonowe i chlorki (97,5 g/kg); N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano -1,3-diamina (9 g/kg), związki powierzchniowo czynne

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżako- i prątkobójcze – 15 min.; grzybobójcze – 5 min. oraz aktywność wobec wirusów: Rota – 5 min.; HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia), Noro – 15 min., Adeno – 30 min.

OPAKOWANIA

Taski® Sprint Degerm: butelka – 1L
(Nr kat. wewn. 6301)

Taski® Sprint Degerm: kanister – 5L
(Nr kat. wewn. 6334)

Wyposażenie dodatkowe:

pompka dozująca do kanistra (1 doza = 30 ml)

Dezynfekcję dużych powierzchni przeprowadzić stosując metodę dwóch wiader lub mopa jednego kontaktu.

- Dotatkowe zmywanie powierzchni wodą nie jest konieczne.
- Nie wycierać, pozostawić do wyschnięcia.
- Powierzchnie kontaktujące się z żywnością po wykonanej procedurze dezynfekcyjnej należy dodatkowo zmyć wodą zdatną do picia.
- UWAGA: nie mieszać z innymi preparatami chemicznymi.

Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać oczy letnią wodą, płukać kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Półknięcie: wypłukać usta. Natychmiast wypić jedną szklankę wody. Nie wywoływać wymiotów. Odczekać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dotatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Taski Sprint Degerm, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniami znajdują się w karcie SDS.

PARTNER STRATEGICZNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska

T: 085 747 93 00

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o.: 2509-05



PODMIOT ODPOWIEDZIALNY W POLSCE:

Diversey Polska Sp. z o.o.,

02-305 Warszawa • Al. Jerozolimskie 134

T: 22/328-10-00

WYTWÓRCA:

Diversey Europe Operations B.V.

Maarssebroeksedijk 2 • 3542 DN Utrecht

The Netherlands • diversey.com

medilab.pl