



Oxivir Excel[®] Foam/Wipe


Gotowa do użycia pianka i chusteczki do dezynfekcji oraz mycia powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia.

- szerokie spektrum biobójcze w krótkim czasie
- pełne działanie wirusobójcze
- idealne do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych

Preparat do użytku profesjonalnego. Wyroby medyczne kl. II a, CE 0044
Produkty biobójcze - pozwolenie nr 6825/16 i 6850/17 (Kat. I, gr. 2)

Treści prezentowane
w niniejszym materiale
przeznaczone są wyłącznie
dla użytkowników profesjonalnych.

Oxivir Excel® Foam/Wipe

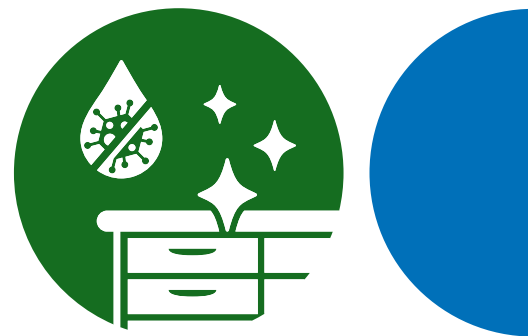

Gotowa do użycia pianka i chusteczki do dezynfekcji oraz mycia powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia.

PODSTAWOWE CECHY

- wykazuje szerokie spektrum biobójcze: bakterio-, drożdżakobójcze oraz działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro)
- dodatkowo przebadany zgodnie z normą EN 16615 i EN 16777
- czas działania: min. 1 min.
- możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach położniczych i noworodkowych
- posiada właściwości odkamieniające
- bezpieczny dla środowiska – nadtlenek wodoru rozpada się na tlen i wodę
- produkt dostępny w postaci chusteczek, pianki, jak również koncentratu

INSTRUKCJA UŻYCIA

Produkt do użytku profesjonalnego.
Preparat gotowy do użycia – nie rozcieńczać!

Oxivir Excel® Foam

1. Nanieść preparat na powierzchnię przy użyciu końcówki spryskującej lub nasączonej ściereczki.
2. Zachować zalecany czas ekspozycji.
3. Przetrzeć i pozostawić do wyschnięcia.
4. Upewnić się, że powierzchnia pozostaje zwilżona przez wymagany czas kontaktu.

Produkty biobójcze należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Postępowanie z odpadami

Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowanie powinno zostać zutylizowane przez certykowanego odbiorcę lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane. Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiązującym prawem.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie dopuszczać do zamarzania. Nie przechowywać razem z produktami zawierającymi związki wybielające na bazie chloru lub siarczyny. Wchodzi w reakcję z alkaliem.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

Informacje ogólne: osobę nieprzytomną ułożyć w pozycji bezpiecznej-bocznej i zasięgnąć porady medycznej. Zapewnić świeże powietrze. W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu zastosować sztuczne oddychanie. Zakaz stosowania sztucznego oddychania usta-usta lub usta-nos. Stosować worek Ambu lub wentylator.

Wdychanie: w przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

PARTNER STRATEGICZNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2509-07

SKŁAD CHEMICZNY

100 g płynu zawiera: nadtlenek wodoru (3,6 g/kg), związki powierzchniowo czynne

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie: bakterio- i drożdżakobójcze – 1 min., wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 30 sek.

OPAKOWANIA

Oxivir Excel® Foam: butelka – 750 ml ze spryskiwaczem (Nr kat. wewn. 6286)

Oxivir Excel® Wipe: opakowanie flow-pack – 100 szt. chusteczek (Nr kat. wewn. 5831)
Rozmiar: 20 cm x 27 cm (25 g/m²)

Wyposażenie dodatkowe:

jednorazowe chusteczki włókninowe

Produkt do użytku profesjonalnego.

Jednorazowe chusteczki gotowe do użycia.

Oxivir Excel® Wipe

1. Otworzyć opakowanie, wyjąć pojedynczą chusteczkę i zamknąć pokrywę.
2. Wytrzeć powierzchnię, upewnić się, że cała powierzchnia jest zwilżona, pozostawić do wyschnięcia.
3. Upewnić się, że powierzchnia pozostaje zwilżona przez wymagany czas kontaktu.
4. Uwaga: – nie mieszać ww. produktów z innymi preparatami chemicznymi, produkty nie są przeznaczone do stosowania na powierzchniach porowatych oraz nieodpornych na działanie kwasów.

Kontakt przez skórę: zmyć skórę dużą ilością letniej, łagodnie płynącej wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

Kontakt z oczami: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku pojawienia się lub utrzymującego się podrażnienia zgłosić się do lekarza.

Połykanie: wypłukać usta. Natychmiast wypić 1 szklankę wody. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Oxivir Excel Foam, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie SDS.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY W POLSCE:

Diversey Polska Sp. z o.o.,

02-305 Warszawa • Al. Jerozolimskie 134
T: 22/328-10-00

WYTWÓRCA:

Diversey Europe Operations B.V.

Maarssenbroeksedijk 2 • 3542 DN Utrecht
The Netherlands • diversey.com



medilab.pl