


CHLOR-CLEAN WIPES

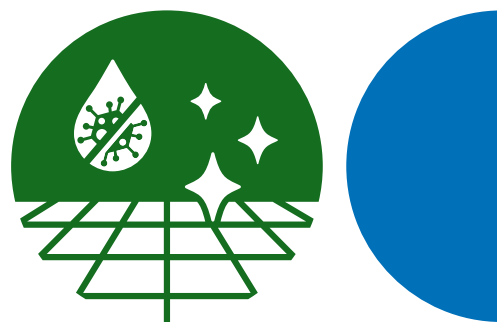

Chlorowe chusteczki o działaniu sporobójczym do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni i wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz do usuwania plam krwi.


Potwierdzona skuteczność w warunkach brudnych wobec bakterii (w tym MRSA), prątków (M. terrae, M. avium), grzybów (A. niger), wirusów (Polio, Adeno), oraz dodatkowe działanie przeciwko: B.subtilis, C.sporogenes, C.difficile 027, C.perfringens.

PROCEDURA MYCIA I DEZYNFEKЦИИ POWIERZCHNI

Preparat do profesjonalnego stosowania.



Przed użyciem zawsze wkładać rękawice i fartuch.

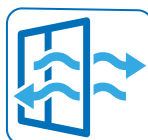


Zapewnić dostateczną wentylację w pomieszczeniu.

OGÓLNA DEZYNFEKCYJA POWIERZCHNI



Wyciągnij chusteczkę i zamknij opakowanie.

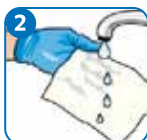

Upewnij się, że z kranu płynie zimna woda, po czym środek chusteczki nasączaj zimną wodą przez jedną, bądź dwie sekundy.



Wyciśnij chusteczkę nad zlewem w celu usunięcia nadmiaru wody (upewnij się, że został wyciśnięty nadmiar wody).



Umyj i zdezynfekuj powierzchnię przy użyciu chusteczki. Pozostaw powierzchnię zwilżoną, ale nie moką. W celu osiągnięcia pożądanego spektrum biobójczego, odczekaj zalecany czas ekspozycji (od 5 do 15 minut).



Wyciągnij chusteczkę i zamknij opakowanie. W przypadku większych plam możesz potrzebować kilku chusteczek.



Położ chusteczkę/ki bezpośrednio na plamę i poczekaj, aż się wchłonie.



Użyj kolejnej chusteczki nasączonej wodą zgodnie z ww. instrukcją użycia, celem ostatecznego umycia i zdezynfekowania powierzchni.



Usuń wszystkie zużyte chusteczki jako odpad medyczny.

ZAWSZE

Zapewnij dobrą wentylację w pomieszczeniu.

- Przechowuj chusteczki zgodnie z zaleceniami Wytwórcy.
- **ZAWSZE używaj zimnej wody!**

W przypadku wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z kartą informacyjną preparatu Chlor-Clean Wipes, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje dotyczące produktu.

NIGDY

- Nigdy nie używaj chusteczek z inną substancją chemiczną.
- Nigdy nie nasączaj chusteczek ciepłą wodą.
- Nigdy nie używaj chusteczek do plam chemicznych i wyrobów skórzanych.
- Nigdy nie stosuj chusteczek do czyszczenia dywanów.

2503-02