



Fugaten®-Spray

Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

- dezynfekcja małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych
- szerokie spektrum biobójcze w krótkim czasie działania
- pełne działanie wirusobójcze
- wygodna i szybka forma aplikacji



Preparat do użytku profesjonalnego.
Wyrób medyczny kl. II a, CE 0482
Produkt biobójczy - pozwolenie
nr 7295/18 (Kat. I, gr. 2 i 4)


Treści prezentowane
w niniejszym materiale
przeznaczone są wyłącznie
dla użytkowników profesjonalnych.

 **MEDILAB®**

medilab.pl

Fugaten® -Spray

Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

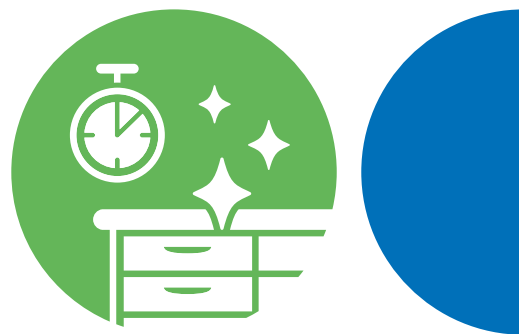

PODSTAWOWE CECHY

- wykazuje szerokie spektrum biobójcze: bakterio-; drożdżako-; grzybo-; prątko- i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro)
- czas działania: min. 1 min.
- zalecany do powierzchni odpornych na działanie alkoholu
- dopuszczony do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością
- idealny do dezynfekcji zabawek
- możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych
- po zastosowaniu szybko schnie nie pozostawiając żadnych śladów

INSTRUKCJA UŻYCIA

Produkt do użytku profesjonalnego.
Preparat gotowy do użycia – nie rozcieńczać!
Dezynfekcja powierzchni czystych.

1. Powierzchnie równomiernie pokryć preparatem (zużywając max. 50 ml/m²) przez rozpylanie lub za pomocą nasączonej ściereczki (zalecane jednorazowe chusteczki włókninowe Medilab). Rozpylać z odległości ok. 30 cm na dezynfekowaną powierzchnię. Jednorazowo dezynfekować maksymalnie 2 m² powierzchni.
2. UWAGA: nie stosować na materiały wrażliwe na alkohol (np. pleksi, powierzchnie lakierowane, bejcowane).
3. Nie używać w pobliżu źródeł ognia, nie nanosić na urządzenia podłączone do prądu.
4. Powierzchnie kontaktujące się z żywnością po wykonanej procedurze dezynfekcyjnej należy dodatkowo zmyć wodą zdatną do picia.

Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2312-05



SKŁAD CHEMICZNY

100 g płynu zawiera:
etanol (700 mg/g)

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie:

bakterio-; drożdżako-; grzybobójcze – 1 min.;
prątkobójcze – 30 sek. oraz wirusobójcze
wobec: HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia),
Adeno, Rota, Noro – 30 sek.; Polio – 5 min.,
Papova SV 40 – 15 min.

OPAKOWANIA

Fugaten® Spray: butelka – 1 L ze spryskiwaczem
Fugaten® Spray: kanister – 5 L

Wyposażenie dodatkowe:

jednorazowe chusteczki włókninowe

WYTWÓRCA:

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str 133
12247 Berlin • Niemcy
lysoform.de