



NOWOŚĆ MediQuick®

Gotowy do użycia alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

- szerokie spektrum biobójcze
- krótki czas działania - już w 30 sek.
- delikatny zapach
- nie pozostawia smug

Preparat do użytku profesjonalnego.
Wyrób medyczny Kl. II a, CE 0044

Treści prezentowane
w niniejszym materiale
przeznaczone są wyłącznie
dla użytkowników profesjonalnych.


 **MEDILAB®**

medilab.pl

NOWOŚĆ

MediQuick®

Gotowy do użycia alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

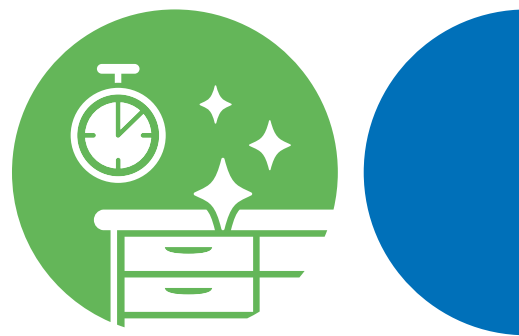

PODSTAWOWE CECHY

- produkt gotowy do użycia
- kompozycja na bazie mieszaniny alkoholi
- szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżakobójczy i wirusobójczy
- bardzo krótki czas działania – już w 30 sek.
- wykazuje szeroką kompatybilność materiałową
- dodatkowo przebadany zgodnie z normą EN 16615
- idealny do dezynfekcji wszelkich powierzchni medycznych typu łóżka, fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny oraz inne trudno dostępne powierzchnie różnego rodzaju sprzętu medycznego
- zalecany do powierzchni odpornych na działanie alkoholi (szkło, aluminium, stal nierdzewna, metal, ceramika)
- wyjątkowo delikatny i nieszkodliwy dla skóry – przebadany dermatologicznie
- wygodna i szybka forma aplikacji preparatu
- możliwość użycia produktu poprzez rozpylenie, jak i przy użyciu ściereczki
- preparat łatwo się rozprowadza
- po zastosowaniu szybko schnie nie pozostawiając żadnych smug
- charakteryzuje się przyjemnym, delikatnym zapachem

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Preparat do użytku profesjonalnego. Gotowy do użycia – nie rozcieńczać!
- Preparat nanosić na powierzchnie czyste przy użyciu ściereczki, bądź bezpośrednio na powierzchnię poprzez spryskiwanie (jeśli jest taka potrzeba).
- Upewnić się, że powierzchnia jest dokładnie zwilżona.
- Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na min. 30 sek., w zależności od wymaganego spektrum biobójczego i zalecanego czasu ekspozycji.
- Przed zastosowaniem środka prosimy o zapoznanie się z etykietą i ulotką informacyjną produktu.

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00 • **F:** 085 747 93 01

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2303-04

SKŁAD CHEMICZNY

100 g płynu zawiera:
25,9 g etanol, 11,8 g propan-2-ol,
0,2 g alkylobiguanide

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie:

bakteriobójcze – 30 sek.; przeciwko prątkom gruźlicy: M.terrae – 5 min.; drożdżakobójcze – 1 min.; aktywność wobec wirusów: VACCINIA, HIV/HBV/HCV – 30 sek., Noro - 5 min.

OPAKOWANIA

MediQuick: butelka – 1 L
MediQuick: kanister – 5 L

Wyposażenie dodatkowe:

- końcówka spryskująca
- jednorazowe chusteczki włókninowe

WYTWÓRCA:

NW-Chemie GmbH
Langbaurchstr. 15
D-53842 Troisdorf, Niemcy
rheosol.com