



NOWOŚĆ

NDP Air Total + GLP CE

**Bezobługowa dezynfekcja
powierzchni nieinwazyjnych
wyrobów medycznych
oraz wyposażenia medycznego.**

- dezynfekcja drogą powietrzną
- szerokie spektrum biobójcze w krótkim czasie działania
- dezynfekcja miejsc trudno dostępnych
- szeroka kompatybilność materiałowa

Preparat do użytku profesjonalnego.
Wyrób medyczny kl. II a, CE 0476

Treści prezentowane
w niniejszym materiale
przeznaczone są wyłącznie
dla użytkowników profesjonalnych.


 **MEDILAB**[®]

medilab.pl

NOWOŚĆ

NDP Air Total + GLP CE

**Bezostługowa dezynfekcja powierzchni
nieinwazyjnych wyrobów medycznych
oraz wyposażenia medycznego.**

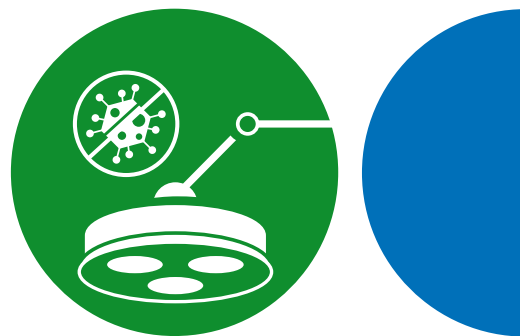

PODSTAWOWE CECHY

- dezynfekcja powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz pomieszczeń za pomocą dyfuzji środka dezynfekcyjnego
- możliwość zastosowania: sale operacyjne i zabiegowe, izolatki, OIOM, transport medyczny, laboratoria, sale pacjentów, gabinety lekarskie, stomatologiczne, weterynaryjne, ambulanse, magazyny odpadów, sale pro morte i inne
- równomierne dotarcie mikrocząsteczek środka dezynfekcyjnego do miejsc trudno dostępnych dzięki rozpyleniu go za pomocą dyfuzora
- prosta i skuteczna metoda dezynfekcji – szybkie użycie produktu bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń, bez zasilania oraz skomplikowanych instrukcji obsługi
- dezynfekcja końcowa – idealne uzupełnienie podstawowych procedur mycia i dezynfekcji powierzchni metodą manualną
- szerokie spektrum biobójcze potwierdzone badaniami
- doskonała kompatybilność materiałowa – możliwość stosowania w obecności sprzętu elektronicznego
- dodatkowe właściwości deodoryzacyjne – eliminacja nieprzyjemnych zapachów

INSTRUKCJA UŻYCIA

Preparat do użytku profesjonalnego.
Stosować wyłącznie pod nieobecność ludzi.

1. Umieścić butelkę na płaskiej, równej powierzchni i zdjąć zabezpieczenie. Należy zachować szczególną ostrożność aby nie skierować zaworu w trakcie uruchamiania w kierunku twarzy.
2. Nacisnąć i przekręcić zawór. Opuścić pomieszczenie. Produkt wytworzy chmurę aerozolu w czasie od 1-3 min. Pozostawić pomieszczenie zamknięte.
3. Po rozpoczęciu uwalniania, pozostawić produkt w celu właściwego działania.
4. Po zakończeniu dyfuzji preparatu nie należy wchodzić do pomieszczenia przynajmniej przez 1 godzinę lub przez czas określony według obowiązujących procedur. Wywietrzyć dezynfekowane pomieszczenie przed kolejnym jego użyciem.

Uwaga: preparat NDP Air Total + GLP CE należy stosować zgodnie z instrukcją użycia producenta. Przed użyciem należy przeczytać uważnie etykietę i zapoznać się z kartą informacyjną produktu.

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00 • **F:** 085 747 93 01

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2402-01

SKŁAD CHEMICZNY

Chlorek didecyldimetyloamoniowy,
2-fenoksyetanol, aldehyd cynamonowy-0,02%.
Zawiera: propan-2-ol.

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie:


- bakteriobójcze (EN 1276, EN 13697, EN 13727),
- grzybobójcze (EN 1650, EN 13697, EN 13624),
- prątkobójcze (EN 14348),
- wirusobójcze (EN 14476: H1N1*).

* Surogat wirusa grypy dla wirusów lipofilnych (np. wirus grypy, Corona, Ebola, Hepatitis, HIV).

OPAKOWANIA

NDP Air Total + GLP CE:
butelka 50 ml (ok. 40 m³)

NDP Air Total + GLP CE:
butelka 300 ml (ok. 150 m³)

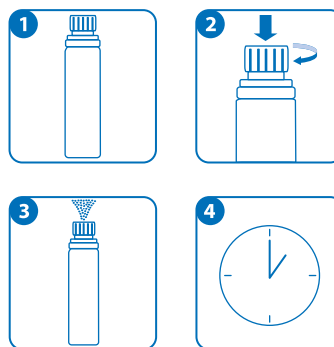

WYTWÓRCA:

Vesismin S.L.U.
C/ Aribau 230-240, 6th floor
L-O, 08006 Barcelona, Hiszpania
www.vesismin.com