




# Oxivir Excel<sup>®</sup> Foam/Wipe

**Gotowa do użycia pianka i chusteczki do dezynfekcji oraz mycia powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia.**

- szerokie spektrum biobójcze w krótkim czasie
- pełne działanie wirusobójcze
- idealne do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych
- nie uszkadza powierzchni

Preparat do użytku profesjonalnego.  
Wyroby medyczne kl. II a, CE 0044  
Produkty biobójcze - pozwolenie  
nr 6825/16 i 6850/17 (Kat. I, gr. 2)

# Oxivir Excel® Foam/Wipe

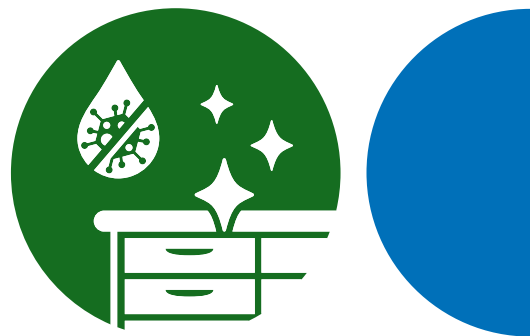

**Gotowa do użycia pianka i chusteczki do dezynfekcji oraz mycia powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia.**

## PODSTAWOWE CECHY

- wykazuje szerokie spektrum biobójcze: bakterio-, drożdżakobójcze oraz działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro)
- dodatkowo przebadany zgodnie z normą EN 16615 i EN 16777
- czas działania: min. 1 min.
- możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach położniczych i noworodkowych
- posiada właściwości odkamieniające
- bezpieczny dla środowiska – nadtlenek wodoru rozpada się na tlen i wodę
- produkt dostępny w postaci chusteczek (dwa rodzaje), pianki, jak również koncentratu

## INSTRUKCJA UŻYCIA

Produkt do użytku profesjonalnego.  
Preparat gotowy do użycia – nie rozcieńczać!

### Oxivir Excel® Foam

1. Nanieść preparat na powierzchnię przy użyciu końcówki spryskującej lub nasączonej ściereczki.
2. Zachować zalecany czas ekspozycji.
3. Przetrzeć i pozostawić do wyschnięcia.
4. Upewnić się, że powierzchnia pozostaje zwilżona przez wymagany czas kontaktu.

**Produkty biobójcze należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.**

**Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.**

### Postępowanie z odpadami

Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowanie powinno zostać zutyłizowane przez certykowanego odbiorcę lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane. Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiązującym prawem.

### Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie dopuszczać do zamarzania. Nie przechowywać razem z produktami zawierającymi związki wybielające na bazie chloru lub siarczyny. Wchodzi w reakcję z alkaliem.

### Środki ostrożności i pierwsza pomoc

**Informacje ogólne:** osobę nieprzytomną ułożyć w pozycji bezpiecznej-bocznej i zasięgnąć porady medycznej. Zapewnić świeże powietrze. W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu zastosować sztuczne oddychanie. Zakaz stosowania sztucznego oddychania usta-usta lub usta-nos. Stosować worek Ambu lub wentylator.

**Wdychanie:** w przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

## PARTNER STRATEGICZNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE:

**MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.**  
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska  
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2211-05

## SKŁAD CHEMICZNY

**100 g płynu zawiera:** nadtlenek wodoru (3,6 g/kg), związki powierzchniowo czynne

## SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

**Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie:** bakterio- i drożdżakobójcze – 1 min., wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 30 sek.

## OPAKOWANIA

Oxivir Excel® Foam:  
butelka – 750 ml ze spryskiwaczem

Oxivir Excel® Wipe:  
opakowanie flow-pack – 100 szt. chusteczek  
Rozmiar: 20 cm x 27 cm (25 g/m<sup>2</sup>)

## Wyposażenie dodatkowe:

jednorazowe chusteczki włókninowe

Produkt do użytku profesjonalnego.  
Jednorazowe chusteczki gotowe do użycia.

### Oxivir Excel® Wipe

1. Otworzyć opakowanie, wyjąć pojedynczą chusteczkę i zamknąć pokrywę.
2. Wytrzeć powierzchnię, upewnić się, że cała powierzchnia jest zwilżona, pozostawić do wyschnięcia.
3. Upewnić się, że powierzchnia pozostaje zwilżona przez wymagany czas kontaktu.
4. Uwaga: – nie mieszać ww. produktów z innymi preparatami chemicznymi, produkty nie są przeznaczone do stosowania na powierzchniach porowatych oraz nieodpornych na działanie kwasów.

**Kontakt przez skórę:** zmyć skórę dużą ilością letniej, łagodnie płynącej wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

**Kontakt z oczami:** ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku pojawienia się lub utrzymującego się podrażnienia zgłosić się do lekarza.

**Połykanie:** wypłukać usta. Natychmiast wypić 1 szklankę wody. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Oxivir Excel Foam, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie SDS.

## PODMIOT ODPOWIEDZIALNY W POLSCE:

**Diversey Polska Sp. z o. o.,**  
02-305 Warszawa • Al. Jerozolimskie 134  
T: 22/328-10-00

## WYTWÓRCA:

**Diversey Europe Operations B.V.**  
Maarssebroeksedijk 2 • 3542 DN Utrecht  
The Netherlands • diversey.com