



Oxivir Excel®

Preparat w koncentracji do dezynfekcji i mycia wszystkich zmywalnych duzych powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia.

- szerokie spektrum biobójcze w krótkim czasie
- pełne działanie wirusobójcze
- idealny do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych
- możliwość stosowania do tapicerek i wykładzin (2%)

Preparat do użytku profesjonalnego. Wyrób medyczny kl. II a, CE 0044
Produkt biobójczy - pozwolenie nr 6857/17 (Kat. I, gr. 2)


Treści prezentowane
w niniejszym materiale
przeznaczone są wyłącznie
dla użytkowników profesjonalnych.

 **MEDILAB®**

medilab.pl

Oxivir Excel®

Preparat w koncentracji do dezynfekcji i mycia wszystkich zmywalnych dużych powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia.

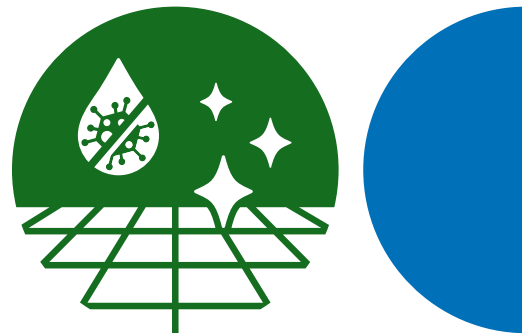

PODSTAWOWE CECHY

- wykazuje szerokie spektrum biobójcze: bakterio-, drożdżakobójcze oraz działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro)
- dodatkowo przebadany zgodnie z normą EN 16615 i EN 16777
- stężenie: min. 1%; czas działania: min. 1 min.
- delikatny dla powierzchni – dedykowany do materiałów wrażliwych na działanie alkoholu (np. inkubatory, głowice USG)
- posiada właściwości odkamieniające
- posiada certyfikat WoolSafe – produkt można bezpiecznie nanosić na tapicerki czy wykładziny (stężenie 2%)
- możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach położniczych i noworodkowych
- bezpieczny dla środowiska - nadtlenek wodoru rozpada się na tlen i wodę
- możliwość dozowania płynu przy użyciu pomp dozujących typu QFM -R Gab HF/LF
- dostępny również w postaci gotowej do użycia pianki i chusteczek

INSTRUKCJA UŻYCIA

Preparat do użytku profesjonalnego. Koncentrat – stosować w roztworach roboczych.

1. Stosować stężenie w zależności od wymaganego spektrum biobójczego i zgodnie z zalecanym czasem ekspozycji (szczegółowe informacje na opakowaniu preparatu).
2. Odmierzyć odpowiednią ilość płynu i dodać do uprzednio odmierzonej objętości wody. Zalecane stężenie min. 1%, tj. 10 ml na 1 litr wody wodociągowej.
3. Przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchnie zmywać dokładnie za pomocą ścierek i mopów nasączonych roztworem roboczym preparatu. Dezynfekcję dużych powierzchni przeprowadzić stosując metodę dwóch wiader lub mopa jednego kontaktu.

Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Postępowanie z odpadami

Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowanie powinno zostać zutylizowane przez certyfikowanego odbiorcę lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane.

Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiązującym prawem.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w zamkniętych pojemnikach z dala od żywności, napojów i pasz.

Nie dopuszczać do zamarzania. Nie przechowywać razem z produktami zawierającymi związki wybielające na bazie chloru lub siarczyny. Wchodzi w reakcję z alkalicznymi i metalami.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

Informacje ogólne: osobę nieprzytomną ułożyć w pozycji bezpiecznej-bocznej i zasięgnąć porady medycznej. Zapewnić świeże powietrze. W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu zastosować sztuczne oddychanie. Zakaz stosowania sztucznego oddychania usta-usta lub usta-nos. Stosować worek Ambu lub wentylator.

Wdychanie: w przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

SKŁAD CHEMICZNY

100 g płynu zawiera:
nadtlenek wodoru (72 g/kg),
związki powierzchniowo czynne

SKUTECZNOŚĆ BIJOBÓJCZA

Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie:

bakterio- i drożdżakobójcze – 1 min.,
wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 5 min.

OPAKOWANIA

Oxivir Excel®: kanister – 5 L

Wyposażenie dodatkowe:

pompka dozująca do kanistra
(1 doza = 20 ml)

4. Dodatkowe zmywanie powierzchni wodą nie jest konieczne.
5. Nie wycierać, pozostawić do wyschnięcia.
6. Uwaga: – nie mieszać z innymi preparatami chemicznymi, – preparat nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach porowatych oraz nieodpornych na działanie kwasów.

Kontakt przez skórę: myć skórę dużą ilością letniej, łagodnie płynącej wody, przez co najmniej 30 min. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Kontakt z oczami: rozchylić powieki i przemywać oczy dużą ilością letniej wody przez co najmniej 15 minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Połykanie: wypłukać usta. Natychmiast wypić 1 szklankę wody. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów. Odczekać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Oxivir Excel, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie SDS.

PARTNER STRATEGICZNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY W POLSCE:

Diversey Polska Sp. z o. o.,
02-305 Warszawa • Al. Jerozolimskie 134
T: 22/328-10-00

WYTWÓRCA:

Diversey Europe Operations B.V.
Maarssebroeksedijk 2 • 3542 DN Utrecht
The Netherlands • diversey.com

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2310-05



medilab.pl