


Tabela dozowania

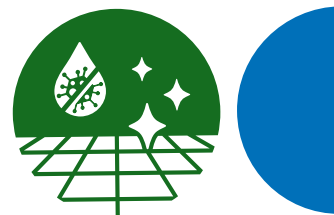

Titan® Chlor Plus Tablets



Tabletki na bazie aktywnego chloru do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz różnego rodzaju wyposażenia pomieszczeń.

	Powierzchnie czyste: niezanieczyszczone organicznie		Powierzchnie brudne: zanieczyszczone organicznie		
SPEKTRUM BIOBÓJCZE	B (L.monocytogenes, C.jejunii, S.enterica), F (A.brasiliensis), Tbc, V (Polio, Adeno, Noro), S (C.difficile, C.difficile R027)	B.subtilis	B (L.monocytogenes, C.jejunii, S.enterica), F (A.brasiliensis), Tbc, V (Polio, Adeno, Noro), S (C.difficile)	B.subtilis	C.difficile R027
STĘŻENIE	1 000 ppm (1 tab./1l wody)	2 000 ppm (2 tab./1l wody)	2 000 ppm (2 tab./1l wody)	2 000 ppm (2 tab./1l wody)	5 000 ppm (5 tab./1l wody)
CZAS EKSPOZYCJI	15 min.	10 min.	15 min.	60 min.	5 min.
1 tab.	1 l wody	500 ml wody	500 ml wody	500 ml wody	200 ml wody
2 tab.	2 l wody	1 l wody	1 l wody	1 l wody	400 ml wody
5 tab.	5 l wody	2,5 l wody	2,5 l wody	2,5 l wody	1 l wody
10 tab.	10 l wody	5 l wody	5 l wody	5 l wody	2 l wody