


# Tabela dozowania



## CHLOR-CLEAN

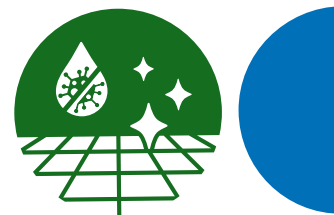

**Tabletki na bazie aktywnego chloru do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz różnego rodzaju wyposażenia pomieszczeń.**

	Powierzchnie czyste: niezanieczyszczone organicznie	Powierzchnie brudne: zanieczyszczone organicznie			
SPEKTRUM BIOBÓJCZE	bakterie, prątki, grzyby, wirusy, spory (B.subtilis, C.difficile, C.difficile 027, C.perfringens)	bakterie, prątki, grzyby, wirusy, spory (C.difficile)	bakterie, drożdże, wirusy (Adeno, Noro)	C.difficile	C.difficile, C.sporogenes
STĘŻENIE	1 000 ppm aktywnego chloru	10 000 ppm aktywnego chloru	1 000 ppm aktywnego chloru	2 000 ppm aktywnego chloru	1 000 ppm aktywnego chloru
CZAS EKSPOZYCJI	15 min.	15 min.	5 min.	15 min.	60 min.
1 tab.	1 litr wody	100 ml wody	1 litr wody	500 ml wody	1 litr wody
2 tab.	2 litry wody	200 ml wody	2 litry wody	1 litr wody	2 litry wody
5 tab.	5 litrów wody	500 ml wody	5 litrów wody	2,5 litra wody	5 litrów wody
10 tab.	10 litrów wody	1 litr wody	10 litrów wody	5 litrów wody	10 litrów wody