


# Tabela dozowania



## Lysoformin<sup>®</sup> rapid

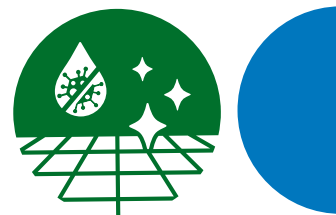

Preparat do dezynfekcji i mycia wszystkich zmywalnych dużych powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia.

STĘŻENIE	0,25%	0,5%	1%	2%
CZAS	5 min.	15 min.	5 min.	15 min.
SPEKTRUM	B, F (C.albicans)	B, Y, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia)	B, Y, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia)	Rota
1 litr wody	2,5 ml koncentratu	5 ml koncentratu	10 ml koncentratu	20 ml koncentratu
2 litry wody	5 ml koncentratu	10 ml koncentratu	20 ml koncentratu	40 ml koncentratu
3 litry wody	7,5 ml koncentratu	15 ml koncentratu	30 ml koncentratu	60 ml koncentratu
4 litry wody	10 ml koncentratu	20 ml koncentratu	40 ml koncentratu	80 ml koncentratu
5 litrów wody	12,5 ml koncentratu	25 ml koncentratu	50 ml koncentratu	100 ml koncentratu
8 litrów wody	20 ml koncentratu	40 ml koncentratu	80 ml koncentratu	160 ml koncentratu
10 litrów wody	25 ml koncentratu	50 ml koncentratu	100 ml koncentratu	200 ml koncentratu