



MEDILAB System DRY&WET Wipes®

**Chusteczki w specjalnie
zaprojektowanym systemie dozującym
do stosowania na sucho i mokro.**

- do wszystkich zmywalnych powierzchni
- możliwość nasączenia środkami do dezynfekcji powierzchni z oferty MEDILAB
- miękkie i wytrzymałe

Produkt do użytku profesjonalnego.

MEDILAB System DRY&WET Wipes®

Chusteczki w specjalnie zaprojektowanym systemie dozującym do stosowania na sucho i mokro.



PODSTAWOWE CECHY

- wykonane z wysokiej jakości włókniny: niskopyłowe, chłonne i wytrzymałe na rozdarcie
- włóknina o gramaturze 50 g/m²
- konfekcjonowane w specjalnych polipropylenowych pojemnikach wielokrotnego użytku wyposażonych w system dozujący o pojemności 5 l
- pojemnik dozujący włókninę może być wielokrotnie użytkowany i myty w urządzeniach myjących w temp. do 70°C
- doskonałe rozwiązanie do codziennego czyszczenia, polerowania i osuszania powierzchni
- po nasączeniu chusteczek odpowiednim preparatem dezynfekcyjnym z oferty Medilab, służą również do mycia i dezynfekcji powierzchni
- etykieta bezpieczeństwa ułatwia pracę z systemem i pozwala uniknąć pomyłek
- idealny System do wielokrotnego wykonywania procedur higienicznych w ciągu dnia
- zapewnia ekonomikę i wysokie standardy higieny

INSTRUKCJA UŻYCIA

Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką i etykietą produktu.

W przypadku stosowania chusteczek jako suche czyszcivo:

1. Włóż rękawice i zdejmij pokrywę.
2. Wyciągnij pierwszą chusteczkę ze środka zwoju.
3. Wstaw zwój z chusteczkami do pojemnika.
4. Przeciagnij pierwszą chusteczkę przez dozownik i zamknij pokrywę.

W przypadku stosowania chusteczek nawilżonych zachowaj

3 pierwsze ww. etapy, a następnie:

5. Przygotuj, zgodnie z zaleceniami producenta środka, odpowiednią ilość preparatu dezynfekcyjnego, w zależności od użytego środka. Powoli napełnij pojemnik środkiem dezynfekcyjnym, wlewając go od środka zwoju do zewnątrz.
6. Przeciagnij pierwszą chusteczkę przez dozownik i zamknij pokrywę. Pozostaw pojemnik na min. 30 minut, aby wszystkie chusteczki zostały równo nawilżone.
7. Opisz i naklej etykietę bezpieczeństwa w odpowiednim miejscu na pojemniku. Nasączony zwój (produktami z oferty MEDILAB) może być używany maksymalnie przez okres 28 dni w zależności od użytego płynu do nasączenia.

Sugerowana ilość środka do zalania to minimum:

1,4 l preparatu celem nasączenia zwoju OPTI (150 szt. chusteczek)

1,8 l preparatu celem nasączenia zwoju MAXI (256 szt. chusteczek)

UWAGA!

Przed nasączeniem chusteczek danym preparatem należy zapoznać się z informacjami zawartymi na jego etykiecie oraz zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących zastosowania środków zawartych w instrukcji użycia.

W celu uzyskania skutecznej dezynfekcji powierzchni, chusteczki należy nasączać profesjonalnymi środkami do mycia i dezynfekcji powierzchni. System MEDILAB DRY&WET Wipes jest kompatybilny z produktami do dezynfekcji powierzchni z oferty MEDILAB – szczególnie polecamy preparaty gotowe do użycia np. Lysoformin Plus-Schaum, Fugaten Spray, Aerodesin 2000, MediQuick, Suma Alcohol Spray D4.12.

OPAKOWANIA

System higieny „OPTI” – 150 szt. & 5l (16 cm x 39 cm)
System higieny „MAXI” – 256 szt. & 5l (18 cm x 39 cm)

.....	
Nazwa preparatu do dezynfekcji powierzchni	
.....	
Stężenie roztworu roboczego	Data zalania
.....	
Zużyć do (max. 28 dni od daty zalania w zależności od użytego płynu do nasączenia)	
.....	
Imię i Nazwisko	



WYTWÓRCA I DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska

T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o.: 2303-07



medilab.pl