



NOWOŚĆ

Medizyme Foam

**Trójenzymatyczny preparat
w pianie do mycia narzędzi
i innych wyrobów medycznych.**

- skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne
- zapobiega zasychaniu zanieczyszczeń
- ułatwia transport zanieczyszczonych narzędzi
- wysoka kompatybilność materiałowa
- wygodna, szybka i bezpieczna forma aplikacji




Preparat do użytku profesjonalnego.
Wyrób medyczny kl. I

NOWOŚĆ

Medizyme Foam

Trójenzymatyczny preparat w pianie do mycia narzędzi i innych wyrobów medycznych.

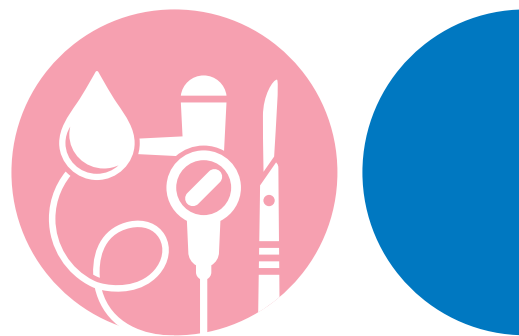

PODSTAWOWE CECHY

- kompleks trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) w połączeniu z detergentem szybko i skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne (krew, ropę, białko, itp.) i ułatwia ich usuwanie bez szcietkowania
- nawilża i zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń na narzędziach (zaschnięciu, koagulacji)
- ułatwia zbieranie zanieczyszczonych narzędzi w trakcie zabiegu oraz transport do dalszej obróbki
- neutralne pH preparatu i zawartość substancji antykorozyjnych chroni narzędzia przed zniszczeniem i korozją
- wysoka kompatybilność materiałowa potwierdzona testami
- potwierdzone bezpieczne zwilżanie narzędzi nawet do 72 godzin
- wygodna, szybka i bezpieczna forma aplikacji, każde opakowanie wyposażone w końcówkę spieniającą
- bezpieczny dla środowiska – biodegradowalny

INSTRUKCJA UŻYCIA

Produkt do użytku profesjonalnego.
Gotowy do użycia – nie rozcieńczać!

1. Równomiernie nanieś piankę bezpośrednio na narzędzia lub inne wyroby medyczne.
2. Upewnij się, że powierzchnia narzędzi jest dokładnie pokryta.
3. Pozostaw na zalecany czas kontaktu – 15 minut.
4. Dokładnie wypłucz narzędzia przed przystąpieniem do manualnego lub maszynowego procesu mycia i dezynfekcji.

Zalecenia dotyczące usuwania: Usuwanie należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecenia dotyczące usuwania produktu/opakowania: Usuwać zawartość/opakowanie do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych. Całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do recyklingu. Zobacz szczegóły w Sekcji 13 karty charakterystyki.

Nie zawiera substancji rakotwórczych, mutagennych, toksycznych, wpływających na rozrodczość i zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

SKŁAD CHEMICZNY


kompleks trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), niejonowe związki powierzchniowo-czynne

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie: bakteriostatyczne

OPAKOWANIA

Medizyme Foam: butelka z końcówką spieniającą – 750 ml

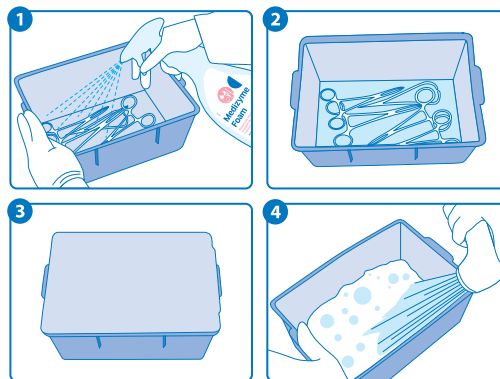

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o.: 2105-02

WYTWÓRCA:

OneLife S.A.
Avenue Albert Einstein, 15
1348 Louvain-la-Neuve • Belgia
onelifebiofilmfree.com



medilab.pl