


Tabela dozowania



Oxivir® Plus

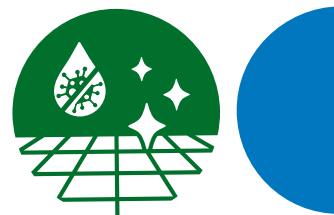

Preparat w koncentracji do dezynfekcji i mycia wszystkich zmywalnych dużych powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia.

STĘŻENIE	2,5%	3,5%	3,5%	15%
CZAS	5 min.	5 min.	15 min.	10 min.
SPEKTRUM	B, V (Rota, Vaccinia, Adeno)	B, V (Polio, Adeno, Noro)	B, Y, F, TBC, V (Polio, Adeno, Noro)	C. difficile
1 litr wody	25 ml koncentratu	35 ml koncentratu	35 ml koncentratu	150 ml koncentratu
2 litry wody	50 ml koncentratu	70 ml koncentratu	70 ml koncentratu	300 ml koncentratu
3 litry wody	75 ml koncentratu	105 ml koncentratu	105 ml koncentratu	450 ml koncentratu
4 litry wody	100 ml koncentratu	140 ml koncentratu	140 ml koncentratu	600 ml koncentratu
5 litrów wody	125 ml koncentratu	175 ml koncentratu	175 ml koncentratu	750 ml koncentratu
8 litrów wody	200 ml koncentratu	280 ml koncentratu	280 ml koncentratu	1200 ml koncentratu
10 litrów wody	250 ml koncentratu	350 ml koncentratu	350 ml koncentratu	1500 ml koncentratu

UWAGA: pompka do kanistra Oxivir Plus dozuje 30 ml płynu (jedna doza).