



Phagocide D


**Preparat na bazie glutaraldehydu
do dezynfekcji wysokiego poziomu
termolabilnych endoskopów
i innych wyrobów medycznych.**

- skuteczność wobec spor potwierdzona normą EN 17126
- aktywność wielokrotnie używanego produktu do 45 dni
- gotowy do użycia - nie wymaga aktywacji



Preparat do użytku profesjonalnego
Wyrób medyczny kl. II b, CE 0459

Phagocide D

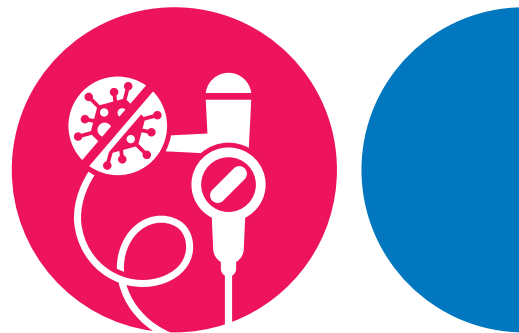

Preparat na bazie glutaraldehydu do dezynfekcji wysokiego poziomu termolabilnych endoskopów i innych wyrobów medycznych.

PODSTAWOWE CECHY

- zalecany do dezynfekcji sporobójczej endoskopów oraz wyrobów medycznych i delikatnego sprzętu medycznego (np. wyrobów okulistycznych), które nie są poddawane sterylizacji wysokotemperaturowej
- dezynfekcja wysokiego poziomu w 30 minut: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy
- skuteczność sporobójcza wobec B.subtilis, B.cereus oraz działanie bójcze wobec spor C.difficile R027 potwierdzone zostały na szczepach normatywnych zgodnie z nową normą EN 17126
- skuteczność wirusobójcza potwierdzona została zgodnie z normami EN 14476 i EN 17111
- ekonomiczny - preparat zachowuje aktywność biobójczą do 45 dni i może być w tym czasie wielokrotnie używany
- aktywność używanego produktu należy kontrolować za pomocą testów paskowych
- cechuje się wysoką kompatybilnością materiałową
- możliwość użycia do dezynfekcji manualnej i półautomatycznej wyrobów medycznych i endoskopów różnych marek
- łatwy i bezpieczny w użyciu - nie wymaga rozcieńczenia, dodawania aktywatora ani czasu aktywacji

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt do użytku profesjonalnego. Gotowy do użycia - nie rozcieńczać.

1. Umyj, wypłucz i osusz wyroby medyczne.
2. Przelej zawartość kanistra do wanny dezynfekcyjnej z pokrywą. Użyj testu paskowego w celu sprawdzenia aktywności produktu.
3. Wyroby medyczne zanurzyć w preparacie. Wypełnij dokładnie kanały endoskopu. Wanienkę dezynfekcyjną przykryj i odczekaj zalecany czas dezynfekcji w celu uzyskania wymaganej skuteczności biobójczej (patrz etykieta).
4. Wyjmij i wypłucz zdezynfekowane wyroby medyczne wodą czystą mikrobiologicznie (sterylizowaną lub filtrowaną), osusz.

Używany Phagocide D zachowuje skuteczność biobójczą do 45 dni i może być wielokrotnie używany. Jego aktywność należy kontrolować za pomocą testów paskowych przeznaczonych do kontroli stężenia glutaraldehydu.

SKŁAD CHEMICZNY

Substancja aktywna: glutaraldehyd

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA


Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, sporobójcze oraz bójcze wobec spor Clostridium - 30 min.

OPAKOWANIA

Phagocide D: kanister - 5 l

Wyposażenie dodatkowe:

Quantofix Glutaraldehyd (paski kontrolne): puszka - 100 szt.

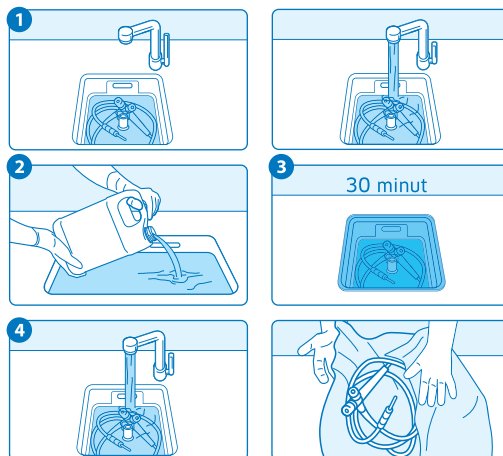

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

Lotka informacyjna - opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2110-05

WYTWÓRCA:

Christeyns France • Laboratoire Phagogene
31 rue de la Mamadrie
44 120 Verton, Francja
christeyns.com • phagogene.fr