


Tabela dozowania

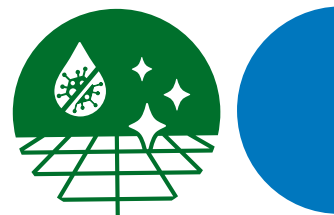

Titan[®] Chlor Plus Tablets



Tabletki na bazie aktywnego chloru do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz różnego rodzaju wyposażenia pomieszczeń.

	Powierzchnie czyste: niezanieczyszczone organicznie		Powierzchnie brudne: zanieczyszczone organicznie
SPEKTRUM BIOBÓJCZE	B (<i>L.monocytogenes</i> , <i>C.jejunii</i> , <i>S.enterica</i>), F (<i>A.brasiliensis</i>), Tbc, V (Polio, Adeno, Noro), S (<i>C.difficile</i> , <i>C.difficile</i> R027)	<i>B.subtilis</i>	B (<i>L.monocytogenes</i> , <i>C.jejunii</i> , <i>S.enterica</i>), F (<i>A.brasiliensis</i>), Tbc, V (Polio, Adeno, Noro), S (<i>C.difficile</i> , <i>C.difficile</i> R027)
STĘŻENIE	1 000 ppm (1 tab./1l wody)	2 000 ppm (2 tab./1l wody)	2 000 ppm (2 tab./1l wody)
CZAS EKSPOZYCJI	15 min.	10 min.	15 min.
1 tab.	1 litr wody	500 ml wody	500 ml wody
2 tab.	2 litry wody	1 litr wody	1 litr wody
5 tab.	5 litrów wody	2,5 litra wody	2,5 litra wody
10 tab.	10 litrów wody	5 litrów wody	5 litrów wody