




Dozownik tokciowy Sterisol



**Estetyczny dozownik ścienny
z ramieniem dozującym.**

- dostosowany do dozowania preparatów w workach o pojemności 700 ml
- wykonany z trwałego tworzywa sztucznego
- bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Dozownik łokciowy Sterisol

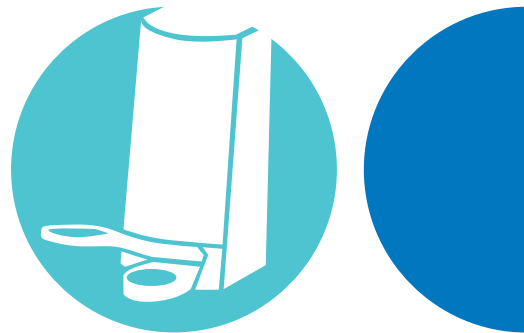

Estetyczny dozownik ścienny z ramieniem dozującym.

PODSTAWOWE CECHY

- dedykowany do dozowania preparatów myjących, dezynfekujących i pielęgnujących Systemu Sterisol
- wykonany z trwałego tworzywa sztucznego
- może być poddawany dekontaminacji w myjni – dezynfektorze
- montaż za pomocą wkrętów lub trwałej taśmy montażowej
- dozowanie polega na naciśnięciu ramienia dozującego na specjalny zawór-zastawkę
- możliwość dozowania za pomocą ramienia plastikowego (w zestawie), metalowego, mini lub przedłużonego (akcesoria dodatkowe)
- w zestawie: obudowa dozownika, płytki montażowa, przezroczysta pokrywa, plastikowe ramię dozujące, taśma montażowa, wkręty
- dostępne są również kolorowe dozowniki, które ułatwiają identyfikację stref w placówce medycznej: czerwony, niebieski, fioletowy, różowy, czarny, szary i z motywem na oddziały dziecięce

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYCIA

Montaż przy użyciu taśmy

- Najpierw dokładnie umyć i odtłuścić powierzchnię, na której będzie montowany dozownik.
- Na płytkę montażową dozownika należy nakleić taśmę.
- Przykleić dozownik do powierzchni właściwej.

Montaż przy użyciu wkrętów

- Najpierw wywiercić otwory zgodnie z rozmieszczeniem na płytce montażowej.
- Płytkę montażową zamontować na powierzchni właściwej przy użyciu wkrętów.
- Do płytki zamontować dozownik.
- Oburącz unieść do góry przezroczystą pokrywę dozownika.
- Włożyć zawór-zastawkę worka w specjalną obręcz na obudowie dozownika. Następnie górną część worka, na której znajdują się otwory zawiesić na wypustkach obudowy dozownika.
- Sprawdzić czy worek z preparatem jest prawidłowo włożony do dozownika.
- Zamknąć oburącz przezroczystą pokrywę dozownika.

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o.: 2112-01

WYMIARY

wymiary obudowy dozownika
(wys. x szer. x głęb.):
200 mm x 100 mm x 110 mm
standardowe ramię dozujące (dł.):
140 mm

AKCESORIA DODATKOWE

metalowe ramię dozujące
mini ramię dozujące
przedłużone ramię dozujące
(stalowe, czerwone, niebieskie)

OPAKOWANIA

dozownik łokciowy Sterisol – 1 szt.

PRODUKTY DEDYKOWANE

MYCIE

Sterisol Äkta Liquid Soap
Sterisol Ultra Liquid Soap
Sterisol Sense Liquid Soap
Sterisol Ultra Hair & Body

DEZYNFEKCJA

Sterisol AHD 1000
Sterisol Phago`gel
Sterisol Preop
Sterisol Ethanol

PIELĘGNACJA

Sterisol Soft Skin Creme
Sterisol Gentle Skin Lotion

WYTWÓRCA:

Sterisol AB
BOX 149
592 23 Vadstena • Szwecja
sterisol.se