



MediBag®

Samoprzylepne torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną.

- torebki samoprzylepne, nie wymagają użycia zgrzewarki
- wykonane z folii wytrzymałej i odpornej na rozerwanie
- szeroka gama rozmiarów

Preparat do użytku profesjonalnego
Wyrób medyczny kl. I

Treści prezentowane
w niniejszym materiale
przeznaczone są wyłącznie
dla użytkowników profesjonalnych.

 **MEDILAB®**

medilab.pl

MediBag®

Samoprzylepne torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną.



PODSTAWOWE CECHY

- torebki samoprzylepne, nie wymagają użycia zgrzewarki
- zgodne z normami PN-EN 868-3 i 5 oraz PN-EN ISO 11607-1 i 2
- wstępnie złożone w celu ułatwienia prawidłowego zamknięcia opakowania
- wyposażone w wycięcie na kciuk na szczycie opakowania ułatwiające otwarcie pakietu
- zewnętrzny i wewnętrzny wskaźnik procesu sterylizacji
- nadruk poza powierzchnią przeznaczoną do bezpośredniego kontaktu z wyrobami sterylizowanymi
- folia wytrzymała i odporna na rozerwanie
- dodatkowe zgrzewy narożne zapobiegają zawijaniu folii na rogach
- szeroka gama rozmiarów

INSTRUKCJA UŻYCIA



1. Sterylizowane przedmioty umieścić wewnątrz torebki.
2. Papierowy pasek osłaniający warstwę kleju usunąć bezpośrednio przed zamknięciem opakowania.
3. Zgiąć wstępnie złożony brzeg papieru i dokładnie zakleić. Prawidłowe zamknięcie torebki zabezpiecza przed tworzeniem kanałków przez i wokół powierzchni samoprzylepnej.

UWAGA: Opakowanie wypełnić w 75%, aby w czasie sterylizacji nie uległo uszkodzeniu. Nadmierne wypełnienie opakowania może spowodować uszkodzenie zgrzewów lub rozerwanie papieru.

Sposób otwierania:

- Otworzyć torebkę z odpowiedniej strony sugerując się symbolem jednoznacznego kierunku otwierania.
- Otworzyć na ok. 30-50%.
- Ostrożnie wyjąć wysterylizowane przedmioty unikając kontaminacji krzyżowej.

PRZECHOWYWANIE

Torebki należy magazynować w chłodnym, suchym i czystym miejscu. Unikać nasłonecznienia i wysokich temperatur.

WYPRODUKOWANO DLA/IMPORTER:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2307-02



NADRUK

- Umieszczony na papierze w obrębie zgrzewu fabrycznego, przy użyciu atramentu na bazie wody, poza powierzchnią przeznaczoną do bezpośredniego kontaktu z wyrobami sterylizowanymi.
- Każdą torebkę opatrzone odpowiednim numerem serii.
- Czytelne oznakowanie w języku polskim.

WARSTWA FOLIOWA

- Wielowarstwowa, bez rozwarstwień, wolna od porów, substancji obcych i toksycznych.
- Optymalna grubość folii – 52 µm – składająca się z sześciu warstw, wytrzymała i odporna na rozerwanie.

WARSTWA PAPIEROWA

- Papier medyczny o gramaturze 60 g/m². Dobrej jakości papier pozwala na uniknięcie tzw. podwójnego pakowania.
- Specjalna charakterystyka papieru zapewnia odpowiednią barierę mikrobiologiczną dla drobnoustrojów.

ZGRZEW

- Trójścieżkowy zgrzew redukuje do minimum pylenie włókien oraz zmniejsza ryzyko zniszczenia opakowania podczas załadunku.
- Wyposażone w tzw. zgrzew zabezpieczający, który chroni opakowanie przed zniszczeniem przy pakowaniu, transporcie i przechowywaniu.
- Dodatkowe zgrzewy narożne zapobiegające zawijaniu folii na rogach.

DOSTĘPNE ROZMIARY

Torebki MediBag są konfekcjonowane po 200 szt. w jednostkowym opakowaniu handlowym.

Rozmiar [mm x mm]

57 x 70	90 x 135	135 x 255
57 x 105	90 x 230	190 x 330
70 x 230	100 x 230	200 x 330

WYTWÓRCA:

Sterileright Packaging Mfg Inc.
Tajwan

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL W EUROPIE:
M/S CMC MEDICAL DEVICES & DRUGS S.L.
C/Horacio Lengo No. 18
CP 29006 Malaga, Hiszpania

medilab.pl