



NOWOŚĆ

PERALEX 9 Hecto +



Preparat na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji wysokiego poziomu termolabilnych endoskopów i innych wyrobów medycznych.

- gotowy do użycia
- skuteczność wobec spor (*B. subtilis*, *B. cereus*, *C. difficile*) potwierdzona normą EN 17126
- aktywność używanego produktu do 14 dni

Preparat do użytku profesjonalnego.
Wyrób medyczny Kl. II b, CE 0459


Treści prezentowane
w niniejszym materiale
przeznaczone są wyłącznie
dla użytkowników profesjonalnych.

 **MEDILAB**[®]

medilab.pl

NOWOŚĆ

PERALEX 9 Hecto +

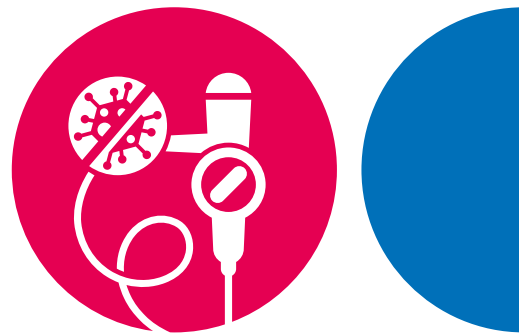

Preparat na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji wysokiego poziomu termolabilnych endoskopów i innych wyrobów medycznych.

PODSTAWOWE CECHY

- zalecany do dezynfekcji endoskopów i innych wyrobów medycznych, które nie są poddawane sterylizacji wysokotemperaturowej
- wysoki poziom dezynfekcji w 10 minut: B, Tbc, F, V, S (B. subtilis, B. cereus, C. difficile)
- skuteczność sporobójcza wobec B. subtilis, B. cereus oraz działanie bójcze wobec spor C. difficile R027 potwierdzone zostały na szczepach normatywnych zgodnie z normą EN 17126
- gotowy do użycia - nie wymaga dodawania aktywatora ani czasu aktywacji
- preparat zachowuje skuteczność biobójczą do 14 dni od pierwszego użycia i może być w tym czasie wielokrotnie używany; aktywność używanego produktu należy kontrolować za pomocą dedykowanych testów paskowych
- brak zjawiska koagulacji białka
- szeroka kompatybilność materiałowa
- możliwość zastosowania do dezynfekcji manualnej i półautomatycznej wyrobów medycznych i endoskopów różnych marek

INSTRUKCJA UŻYCIA

Produkt do użytku profesjonalnego.

1. Umyj, wypłucz i osusz wyroby medyczne.
2. Zawartość kanistra przelej do wanny dezynfekcyjnej z pokrywą. Użyj testu paskowego w celu sprawdzenia jego aktywności. Nie wymaga czasu aktywacji!
3. W roztworze roboczym umieść wyroby medyczne. Przepłucz roztworem kanały endoskopu. Odczekaj 10 minut w celu uzyskania działania sporobójczego.
4. Po upływie czasu ekspozycji wyjmij i wypłucz zdezynfekowane wyroby medyczne wodą czystą mikrobiologicznie (sterylizowaną lub filtrowaną). Kanały endoskopu płucz przez minimum 5 minut. Osusz.

Roztwór roboczy PERALEX 9 Hecto + zachowuje skuteczność biobójczą do 14 dni od pierwszego użycia i może być wielokrotnie używany. Jego aktywność należy kontrolować za pomocą testów paskowych.

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o.: 2303-02

SKŁAD CHEMICZNY

Substancja aktywna: kwas nadoctowy

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie:
bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, sporobójcze – 10 min.

OPAKOWANIA

PERALEX 9 Hecto +: kanister – 5 L

Wyposażenie dodatkowe:

PERATEST 500 (paski kontrolne do PERALEX 9 Hecto +): puszka – 100 szt.

WYTWÓRCA:

Franklab
Z.A. de l'Observatoire, 3 av. des Frênes
78180 Montigny Le Bretonneux • Francja
franklab.com