


Tabela dozowania



exeol floor

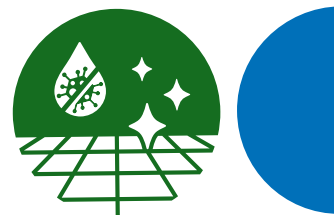

Preparat w koncentracji do dezynfekcji i mycia wszelkiego rodzaju powierzchni (podłogi, ściany, wyposażenie pomieszczeń) za pomocą metody przecierania na mokro. Przeznaczony do powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością.

STĘŻENIE	0,25%	0,5%	0,5%	1%
CZAS	15 min.	5 min.	60 min.	60 min.
SPEKTRUM	B, Y (C.albicans)	B, Y (C.albicans)	V (Vaccinia)	TBC
METODYKA	EN 13727, EN 16615, EN 1276, EN 13624, EN 1650		EN 14476 (15 min.) EN 16777(60 min.)	EN 14348
1 litr wody	2,5 ml koncentratu	5 ml koncentratu	5 ml koncentratu	10 ml koncentratu
2 litry wody	5 ml koncentratu	10 ml koncentratu	10 ml koncentratu	20 ml koncentratu
3 litry wody	7,5 ml koncentratu	15 ml koncentratu	15 ml koncentratu	30 ml koncentratu
4 litry wody	10 ml koncentratu	20 ml koncentratu	20 ml koncentratu	40 ml koncentratu
5 litrów wody	12,5 ml koncentratu	25 ml koncentratu	25 ml koncentratu	50 ml koncentratu
8 litrów wody	20 ml koncentratu	40 ml koncentratu	40 ml koncentratu	80 ml koncentratu
10 litrów wody	25 ml koncentratu	50 ml koncentratu	50 ml koncentratu	100 ml koncentratu

UWAGA: pompka do kanistra exeol floor dozuje 20 ml płynu (jedna doza).

*Znaczenie użytych powyżej skrótów:

B- bakteriobójczy, TBC - prątkobójczy (M.terrae, M.avium), Y (C.albicans) - bójczy wobec grzybów drożdżopodobnych, V (Vaccinia) - bójczy wobec wirusów ostonkowych (np. HIV, HBV, HCV...)

Ulotka została wydrukowana z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności środowiskowej.

