



# MediBag®

## Samoprzylepne torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną.

- torebki samoprzylepne, nie wymagają użycia zgrzewarki
- wykonane z folii wytrzymałej i odpornej na rozerwanie
- szeroka gama rozmiarów

Preparat do użytku profesjonalnego  
Wyrób medyczny kl. I

Treści prezentowane  
w niniejszym materiale  
przeznaczone są wyłącznie  
dla użytkowników profesjonalnych.

 **MEDILAB®**

[medilab.pl](http://medilab.pl)

# MediBag®

## Samoprzylepne torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną.



### PODSTAWOWE CECHY

- torebki samoprzylepne, nie wymagają użycia zgrzewarki
- zgodne z normami PN-EN 868-3 i 5 oraz PN-EN ISO 11607-1 i 2
- wstępnie złożone w celu ułatwienia prawidłowego zamknięcia opakowania
- wyposażone w wycięcie na kciuk na szczycie opakowania ułatwiające otwarcie pakietu
- zewnętrzny i wewnętrzny wskaźnik procesu sterylizacji
- nadruk poza powierzchnią przeznaczoną do bezpośredniego kontaktu z wyrobami sterylizowanymi
- folia wytrzymała i odporna na rozerwanie
- dodatkowe zgrzewy narożne zapobiegają zawijaniu folii na rogach
- szeroka gama rozmiarów

### INSTRUKCJA UŻYCIA



1. Sterylizowane przedmioty umieścić wewnątrz torebki.
2. Papierowy pasek osłaniający warstwę kleju usunąć bezpośrednio przed zamknięciem opakowania.
3. Zgiąć wstępnie złożony brzeg papieru i dokładnie zakleić. Prawidłowe zamknięcie torebki zabezpiecza przed tworzeniem kanałków przez i wokół powierzchni samoprzylepnej.

**UWAGA: Opakowanie wypełnić w 75%, aby w czasie sterylizacji nie uległo uszkodzeniu. Nadmierne wypełnienie opakowania może spowodować uszkodzenie zgrzewów lub rozerwanie papieru.**

### Sposób otwierania:

- Otworzyć torebkę z odpowiedniej strony sugerując się symbolem jednoznacznego kierunku otwierania.
- Otworzyć na ok. 30-50%.
- Ostrożnie wyjąć wysterylizowane przedmioty unikając kontaminacji krzyżowej.

### PRZECHOWYWANIE

Torebki należy magazynować w chłodnym, suchym i czystym miejscu. Unikać nasłonecznienia i wysokich temperatur.

### WYPRODUKOWANO DLA/IMPORTER:

**MEDILAB Sp. z o.o.**  
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska  
T: 085 747 93 00

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2603-03



### NADRUK

- Umieszczony na papierze w obrębie zgrzewu fabrycznego, przy użyciu atramentu na bazie wody, poza powierzchnią przeznaczoną do bezpośredniego kontaktu z wyrobami sterylizowanymi.
- Każdą torebkę opatrzone odpowiednim numerem serii.
- Czytelne oznakowanie w języku polskim.

### WARSTWA FOLIOWA

- Wielowarstwowa, bez rozwarstwień, wolna od porów, substancji obcych i toksycznych.
- Optymalna grubość folii – 52 µm – składająca się z sześciu warstw, wytrzymała i odporna na rozerwanie.

### WARSTWA PAPIEROWA

- Papier medyczny o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>. Dobrej jakości papier pozwala na uniknięcie tzw. podwójnego pakowania.
- Specjalna charakterystyka papieru zapewnia odpowiednią barierę mikrobiologiczną dla drobnoustrojów.

### ZGRZEW

- Trójścieżkowy zgrzew redukuje do minimum pylenie włókien oraz zmniejsza ryzyko zniszczenia opakowania podczas załadunku.
- Wyposażone w tzw. zgrzew zabezpieczający, który chroni opakowanie przed zniszczeniem przy pakowaniu, transporcie i przechowywaniu.
- Dodatkowe zgrzewy narożne zapobiegające zawijaniu folii na rogach.

### DOSTĘPNE ROZMIARY

Torebki MediBag są konfekcjonowane po 200 szt. w jednostkowym opakowaniu handlowym.

### Rozmiar [mm x mm]

57 x 70	90 x 135	135 x 255
57 x 105	90 x 230	190 x 330
70 x 230	100 x 230	200 x 330

Ulotka została wydrukowana z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności środowiskowej.



### WYTWÓRCA:

**Sterileright Packaging Mfg Inc.**  
Tajwan

**AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL W EUROPIE:**  
**M/S CMC MEDICAL DEVICES & DRUGS S.L.**  
C/Horacio Lengo No. 18  
CP 29006 Malaga, Hiszpania

medilab.pl