



NOWOŚĆ

exeol surf optimal

Bezalkoholowy preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia.

- dezynfekcja i mycie wielu rodzajów powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych
- działanie biobójcze osiągnięte już w 2 min.
- szeroka kompatybilność materiałowa
- odpowiedni do powierzchni kontaktujących się z żywnością

Treści prezentowane w niniejszym materiale przeznaczone są wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.



MD

CE 0459


Wyrób medyczny kl. II a
Produkt biobójczy - pozwolenie
nr 10125/25 (Kat. I, gr. 2,4)
Preparat do użytku profesjonalnego

MEDILAB®

medilab.pl

NOWOŚĆ

exeol surf optimal

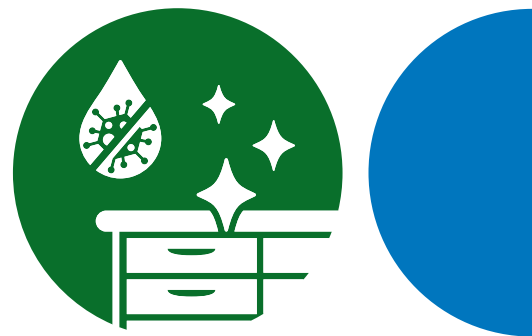

Bezalkoholowy preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia .

PODSTAWOWE CECHY

- zastosowanie jako:
 - **wyrób medyczny:** mycie i dezynfekcja powierzchni inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych wielokrotnego użytku poprzez przecieranie .
 - **produkt biobójczy:** przeznaczony do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz różnego rodzaju wyposażenia metodą przecierania, mających i niemających kontaktu z żywnością.
- synergia działania dwóch substancji czynnych
- skuteczność bakterio-, drożdżakobójcza, bójcza wobec prątków gruźlicy oraz działanie bójcze wobec wirusów otoczkowych oraz aktywność wobec wirusów: Noro, Rota, Adeno
- szeroka skuteczność biobójcza osiągnięta już w czasie 2 minut
- dodatkowa skuteczność potwierdzona badaniami na szczepach bakterii opornych, w tym: *Acinetobacter baumannii* – szczep wielolekooporny (MDR), *Klebsiella pneumoniae* – szczep oporny na karbapenemy, *Staphylococcus aureus* – szczep oporny na metycylinę (MRSA)
- właściwości myjące wzmacnione przez środek powierzchniowo czynny obniżający napięcie powierzchniowe do niskich wartości (TS < 27mN/m)
- dedykowany do materiałów wrażliwych na działanie alkoholu
- dopuszczony również do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością

SKŁAD CHEMICZNY

substancje czynne:

Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzylamonu
(nr CAS: 68424-85-1) – 0,8 g/kg

Chlorek didecyldimetyloamonium
(nr CAS: 7173-51-5) – 1,6 g/kg

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie:

warunki brudne, gotowy do użycia, temp. 20°C:
bakteriobójcze (w tym: *A. baumannii*, *E.coli*, *K. pneumoniae*, *S. aureus*), drożdżakobójcze (w tym *C. auris*),
działanie bójcze wobec wirusów otoczkowych – 2 min.,
działanie przeciwko *A.fumigatus*, bójcze wobec prątków gruźlicy (*M.terrae*) – 30 min.
Aktywność wobec wirusa Noro i Rota – 15 min
oraz wobec wirusa Adeno – 45 min.

OPAKOWANIA

exeol surf optimal:

butelka – 750 ml ze spryskiwaczem
(Nr kat. wewn. 7802)

INSTRUKCJA UŻYCIA


Preparat gotowy do użycia - nie rozcieńczać!

1. Przy pierwszym użyciu, zerwać z dyszy plombę i odblokować zabezpieczenie rozpylacza.
2. Z odległości 20-30 cm spryskać równomiernie dezynfekowaną powierzchnię preparatem (zużywając ±6 ml/m²) tak, aby cała powierzchnia była dokładnie pokryta.
3. Umyć i zdezynfekować powierzchnię przecierając czystą ściereczką.
4. Odczekać minimum 2 min. lub dłużej zgodnie z pożądanym zakresem działania biobójczego.
5. Po upływie wymaganego czasu kontaktu, pozostawić do wyschnięcia lub osuszyć jednorazową, czystą i suchą ściereczką.
6. Po użyciu zablokować zabezpieczenie spryskiwacza.

Nie służyć - z wyjątkiem powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością, błonami śluzowymi, bądź jeśli wymagany jest kolejny etap dezynfekcji. Produkt można stosować wielokrotnie na tej samej powierzchni, w zależności od potrzeb.

Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne zgodnie obowiązującymi przepisami. Nie mieszać z innymi produktami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Przed każdym użyciem należy sprawdzić termin ważności podany na etykiecie. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

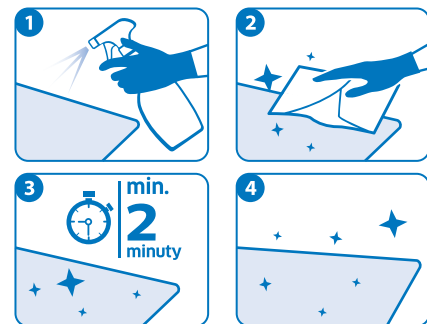

 **PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE:**

MEDILAB Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00

 marketing@medilab.pl

 **WYTWÓRCA:**

Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France
T: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

 **MEDILAB®**

medilab.pl

Ulotka została wydrukowana z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności środowiskowej.

